

Document No <i>Doküman No</i>	Issue Date <i>Yayın Tarihi</i>	Revision No <i>Revizyon No</i>	Revision Date <i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023



**VISCOFLOW CANNULA**  
**VİSKOFLOW KANÜL**

<b>Company Name</b> <i>Şirket Adı</i>	:	MMT MERAN MEDİKAL TEKNOLOJİ KOLL. ŞTİ. Ahmet Cemil Baytaş ve Fatma Baytaş
<b>Company Representative</b> <i>Firma temsilcisi</i>	:	Cemil BAYTAŞ / General Manager
<b>Address</b> <i>Adres</i>	:	İstanbul Trakya Serbest Bölgesi Ferhatpaşa S.B. Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No:22/201 Çatalca/İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>Phone</b> <i>Telefon</i>	:	+90 212 786 6253
<b>Web</b> <i>Web</i>	:	<a href="http://www.merantip.com">www.merantip.com</a>

**Product Structure and General Features:**

**Ürün Yapısı ve Genel Özellikler**

The Viscoflow Cannula is designed for the marking of the capsule and to create an openness. Cannula tip is made of 304 Stainless Steel. The connection area at the back of the cannula is made of polycarbonate raw material. The products are available for single use and sterile. The cannulas to be used may differ depending on the operation area and the surgeon's choice. Models are available in various diameters and sizes in order to be suitable for every eye structure.

*Viskoflow Kanülü, kapsülün işaretlenmesi ve bir açıklık oluşturulması için tasarlanmıştır. Kanül ucu 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir. Kanülün arka kısmındaki bağlantı bölgesi polikarbonat hammadde-den üretilmiştir. Ürünler tek kullanımlık ve sterildir. Kullanılacak kanüller operasyon bölgesine ve cerrahın tercihine göre farklılık gösterebilir. Her göz yapısına uygun olması için çeşitli çap ve ebatlarda modeller mevcuttur.*

**Product Models:**

**Ürün Modeli:**

Model and size information of the Viscoflow Cannula products manufactured by us are shown in **TF03.TB.01 Annex-1 Product Models Table** with pictures.

*Tarafımızdan imal edilen Viskoflow Kanül ürünlerinin model ve ölçü bilgileri resimlerle **TF03.TB.01 Ek-1 Ürün Modelleri Tablosunda** gösterilmektedir.*

**Intended Use:**

**Amaçlanan Kullanım:**

Viscoflows are disposable and used for the marking of the capsule and to create an openness. It has sharp tips for puncture and cut/tear the capsule.

*Viskoflows Kanüller tek kullanımlıktır ve kapsülün işaretlenmesi ve bir açıklık oluşturmak için kullanılır. Kapsülü delmek ve kesmek için keskin uçları vardır.*

Document No <i>Doküman No</i>	Issue Date <i>Yayın Tarihi</i>	Revision No <i>Revizyon No</i>	Revision Date <i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023

### **Indications:**

#### **Endikasyonlar:**

Viscoflow Cannulas are used on eye capsules to tear and to mark eye capsule in cataract surgeries.  
*Viskoflow Kanülleri, katarakt ameliyatlarında göz kapsüllerini yırtmak ve işaretlemek için göz kapsülleri üzerinde kullanılır.*

### **Patient Population:**

#### **Hasta Popülasyonu:**

Patients with various eye conditions, especially cataracts.  
*Çeşitli göz rahatsızlıkları, özellikle katarakt olan hastalar.*

### **Contraindications:**

#### **Kontrendikasyonlar:**

It should not be used other than ophthalmic surgery.  
*Göz cerrahisi dışında kullanılmamalıdır.*  
It should not be used on infected eyes.  
*Enfekte gözlerde kullanılmamalıdır.*

### **Complications:**

#### **Komplikasyonlar:**

If the tip of the Cannula is not sharp, it may damage the tissue of the eye.  
*Kanülün ucu keskin değilse göz dokusuna zarar verebilir*  
After operation mild chemosis and redness can occur.  
*Ameliyattan sonra hafif kemozis ve kızarıklık oluşabilir.*  
Vitreous hemorrhage can occur.  
*Vitreus kanaması meydana gelebilir.*  
Intraoperative serous occurrence.  
*İntraoperatif seröz oluşumu*  
Iris laceration can occur.  
*İris yırtılması meydana gelebilir.*  
Lens capsule tear can occur.  
*Lens kapsülü yırtılması meydana gelebilir.*  
Corneal edema can occur.  
*Kornea ödemi oluşabilir.*  
Hyphamea can occur.  
*Hifema oluşabilir.*  
Vitreous loss can occur.  
*Vitreus kaybı olabilir.*  
Retinal damage can occur.  
*Retina hasarı oluşabilir.*  
Choroidal detachment can occur.  
*İyatrojenik retina yırtıkları oluşabilir.*

Document No <i>Doküman No</i>	Issue Date <i>Yayın Tarihi</i>	Revision No <i>Revizyon No</i>	Revision Date <i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023

### **Side Effects:**

#### **Yan Etkiler:**

There are no known side effects of the product.

*Cihazın bilinen bir yan etkisi yoktur.*

### **Product Users:**

#### **Ürün Kullanıcıları:**

The product should be used by specialist physicians who have completed the necessary medical training. Users must have operational experience.

*Ürün gerekli tıp eğitimini tamamlamış uzman hekimler tarafından kullanılmalıdır.*

*Kullanıcılar operasyonel deneyime sahip olmalıdır.*

### **Instruction for Use:**

#### **Kullanım Talimatı:**

Viscoflow Cannulas are restricted for use by surgeons trained in ophthalmic surgery.

*Viskoflow Kanüller, oftalmik cerrahi konusunda eğitilmiş cerrahlar tarafından kullanım için kısıtlanmıştır.*

- The cannulas should be opened from the marked are without disruption of the sterility.  
*Kanüller sterilite bozulmadan işaretli yerlerden açılmalıdır.*
- Cannula should be connected to the Equipment by a sterile person according to usage of the product.  
*Kanül, ürünün kullanımına göre steril bir kişi tarafından ekipmana bağlanmalıdır.*
- Viscoflow Cannula is inserted into eye capsule to mark and to tear eye capsule.  
*Göz kapsülünü işaretlemek ve yırtmak için göz kapsülüne Viskoflow Kanülü yerleştirilir.*
- Dispose of used products in accordance with established hospital protocol for hazardous waste.  
*Kullanılmış ürünleri, tehlikeli atıklar için belirlenmiş hastane protokolüne uygun olarak atın.*

### **Factors That Can Affect the Success of The Operation:**

#### **Operasyonun Başarısını Etkileyebilecek Faktörler:**

- The user's experience and experience in the operation,  
*Kullanıcının operasyondaki deneyimi*
- Product selection in suitable type and size for the patient to be applied,  
*Uygulanacak hastaya uygun tip ve ebatta ürün seçimi,*
- Eye structure of the patient,  
*Hastanın göz yapısı,*
- Failure of the patient to have the necessary controls after the operation.  
*Hastanın operasyon sonrası gerekli kontrolleri yaptıramaması.*

### **Sterility/Sterilization Method:**

#### **Sterilite/Sterilizasyon Yöntemi:**

The products are sterilized with Ethylene Oxide and presented to the user as sterile.

*Ürünler Etilen Oksit ile sterilize edilerek steril olarak kullanıcıya sunulmaktadır.*

### **Single Use / Reusability Status:**

#### **Tek Kullanımlık / Yeniden Kullanılabilirlik Durumu:**

The products are for single use only. There is absolutely no reusability.

*Ürünler tek kullanımlıktır. Tekrar kullanılabilirliği kesinlikle yoktur.*

Document No <i>Doküman No</i>	Issue Date <i>Yayın Tarihi</i>	Revision No <i>Revizyon No</i>	Revision Date <i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023

### **Product Storage and Shipping Conditions**

#### **Ürün Saklama ve Nakliye Koşulları**

Protect the product against direct sunlight during shipment and storage.

*Ürünü nakliye ve depolama sırasında doğrudan güneş ışığına karşı koruyun.*

Keep the product dry in any environment.

*Ürünü her ortamda kuru tutun.*

Store the products between 5 ° C and 35 ° C temperature and maximum 70% RH humidity.

*Ürünleri 5°C ile 35°C sıcaklık ve maksimum %70 RH nem arasında saklayınız.*

### **Warning and Precautions**

#### **Uyarı ve Önlemler:**



#### **Warning and Precautions**

#### **Uyarı ve Önlemler**



- Do not use products with damaged packaging. Please send the damaged products to our company.
- *Ambalajı hasarlı ürünleri kullanmayınız. Lütfen hasarlı ürünleri firmamıza gönderiniz.*
- In order for the operation to be performed safely and effectively, the user should consider the surgical technique part specified in this user manual.  
*Operasyonun güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için kullanıcı bu kullanım kılavuzunda belirtilen cerrahi teknik kısmını dikkate almalıdır.*
- Single use product; Do not reuse products. The product used in a patient should never be used on another patient, even if it is used for a short time.  
*Tek kullanımlık ürün; Ürünleri tekrar kullanmayın. Bir hastada kullanılan ürün, kısa süreli de olsa başka bir hastada kesinlikle kullanılmamalıdır.*
- The product is packaged sterile. Do not sterile the product.  
*Ürün steril olarak paketlenmiştir. Ürünü sterilize etmeyin.*
- Professionals should use the product.  
*Profesyoneller ürünü kullanmalıdır.*
- Do not use the expired products.  
*Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.*
- Products should not use for purposes other than specified in this user manual.  
*Ürünler, bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır.*
- Pay attention to markings on the product labels.  
*Ürün etiketlerindeki işaretlere dikkat ediniz.*

### **Medical Equipment Used with Products:**

#### **Medical Equipment Used with Products:**

The products are used with injectors during surgery.

*Ürünler operasyondaki enjektörlü olarak kullanılmaktadır.*

### **Accessory:**

#### **Aksesuar:**

The product does not have any accessories.

*Üründe herhangi bir aksesuar bulunmamaktadır.*



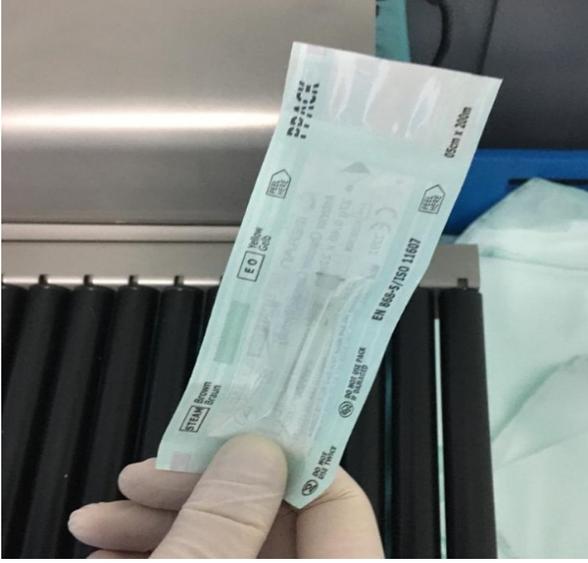
**Document No**  
**Doküman No**  
TF03-MMT-IFU03-11

**Issue Date**  
**Yayın Tarihi**  
03.06.2022

**Revision No**  
**Revizyon No**  
02

**Revision Date**  
**Revizyon Tarihi**  
20.11.2023

The packaging sample of our products is as seen in the photos below.  
*Ürünlerimizin ambalaj örneği aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibidir.*



<b>Document No</b> <i>Doküman No</i>	<b>Issue Date</b> <i>Yayın Tarihi</i>	<b>Revision No</b> <i>Revizyon No</i>	<b>Revision Date</b> <i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023

**Symbols Prepared According to EN 15223-1 Standard and Their Meanings**  
***EN 15223-1 Standardına Göre Hazırlanan Semboller ve Anlamları***

**Internal Labels:**  
***İç Etiketler:***

1	2	3	4		
	Product Name/Model				
5	6	7	8		
			TF03.LB01/R04/20.11.2023		
9	10	11	12	13	14
					
15					
	<b>MMT MERAN MEDİKAL TEKNOLOJİ KOLL. ŞTİ. Ahmet Cemil Baytaş ve Fatma Baytaş</b> <b>Adress:</b> İstanbul Trakya Serbest Bölgesi Ferhatpaşa S.B. Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No: 22/201 Çatalca/İSTANBUL/TÜRKİYE <b>Phone:</b> 0 212 786 62 53 <b>Web:</b> <a href="http://www.merantip.com">www.merantip.com</a>				

Document No	Issue Date	Revision No	Revision Date
<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023

Symbols and Description	
<i>Semboller ve Açıklamaları</i>	
1	Brand logo <i>Marka logosu</i>
2	Product Name <i>Ürün adı</i>
3	Notified Body Number <i>Onaylanmış Kuruluş Numarası</i>
4	Should Be Used By An Expert <i>Bir Uzman Tarafından Kullanılmalıdır</i>
5	Sterilized with Ethylene Oxide <i>Etilen Oksit ile steril edilmiştir/Tek steril bariyer sistemi kullanılmıştır</i>
6	Lot Number <i>Lot Numarası</i>
7	Reference Number <i>Üretim Ülkesi/Üretim Tarihi</i>
8	Label Information <i>Etiket Bilgileri</i>
9	Single Use <i>Tek kullanımlık</i>
10	Do Not Sterilize The Second Time <i>İkinci kez steril etmeyin</i>
11	Expiration Date <i>Son kullanma tarihi</i>
12	Unique Device Identifier <i>Tekil Cihaz Tanımlayıcı</i> (01) Unique device identifier <i>(01) Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı</i> (17) Expiration Date <i>(17) Son Kullanma Tarihi</i> (10) LOT Number <i>(10) LOT Numarası</i> (30) Quantity <i>(30) Adet</i>
13	Country of Manufacture/Production Date <i>Üretim Ülkesi/Üretim Tarihi</i>
14	Do Not Use if the Package is Damaged <i>Paket Hasarlıysa Kullanmayın</i>
15	Manufacturer Information <i>Üretici Bilgileri</i>

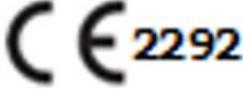
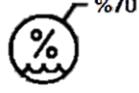
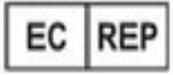
Document No  
Doküman No  
TF03-MMT-IFU03-11

Issue Date  
Yayın Tarihi  
03.06.2022

Revision No  
Revizyon No  
02

Revision Date  
Revizyon Tarihi  
20.11.2023

**External Labels:****Dış Etiketler:**

1	2		3		4	
	Product Name/Model					
5	6		7		8	9
	 XXXXXXXX	 XXXXXXXX	TF03.LB02/R0 2/20.11.2023			
10	11	12	13	14	15	16
						
17	18	19		20		
						
21			22			
			 <p><b>MMT MERAN MEDİKAL TEKNOLOJİ KOLL. ŞTİ. Ahmet Cemil Baytaş ve Fatma Baytaş</b> Adress: İstanbul Trakya Serbest Bölgesi Ferhatpaşa S.B. Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No: 22/201 Çatalca/İSTANBUL/TÜRKİYE Phone: 0 212 786 62 53 Web: <a href="http://www.merantip.com">www.merantip.com</a></p>			

<b>Document No</b> <i>Doküman No</i>	<b>Issue Date</b> <i>Yayın Tarihi</i>	<b>Revision No</b> <i>Revizyon No</i>	<b>Revision Date</b> <i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023

<b>Symbols and Description</b> <i>Semboller ve Açıklamaları</i>	
1	Brand logo <i>Marka logosu</i>
2	Product Name <i>Ürün adı</i>
3	Notified Body Number <i>Onaylanmış Kuruluş Numarası</i>
4	See User Manual <i>Kullanım Kılavuzuna bakın</i>
5	Should Be Used By An Expert <i>Bir Uzman Tarafından Kullanılmalıdır</i>
6	Lot Number <i>Lot Numarası</i>
7	Country of Manufacture/Production Date <i>Üretim Ülkesi/Üretim Tarihi</i>
8	Label Information <i>Etiket Bilgileri</i>
9	Medical Device <i>Medikal Cihaz</i>
10	Sterilized with Ethylene Oxide <i>Etilen Oksit ile steril edilmiştir/Tek steril bariyer sistemi kullanılmıştır</i>
11	Single Use <i>Tek kullanımlık</i>
12	Do Not Sterilize The Second Time <i>İkinci kez steril etmeyin</i>
13	Do Not Expose to Direct Sunlight <i>Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın</i>
14	Keep Away From Contact With Water <i>Su İle Temas Etmekten Uzak Durun</i>
15	Keep at the Specified Temperature Range <i>Belirtilen Sıcaklık Aralığında Tutun</i>
16	Reference Number <i>Referans Numarası</i>
17	Unique Device Identifier <i>Tekil Cihaz Tanımlayıcı</i> (01) Unique device identifier <i>(01) Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı</i> (17) Expiration Date <i>(17) Son Kullanma Tarihi</i> (10) LOT Number <i>(10) LOT Numarası</i> (30) Quantity <i>(30) Adet</i>
18	Do Not Use if the Package is Damaged <i>Paket Hasarlıysa Kullanmayın</i>

## User Manual



### Kullanım Kılavuzu

Document No <i>Doküman No</i>	Issue Date <i>Yayın Tarihi</i>	Revision No <i>Revizyon No</i>	Revision Date <i>Revizyon Tarihi</i>
TF03-MMT-IFU03-11	03.06.2022	02	20.11.2023

19	Expiration Date <i>Son kullanma tarihi</i>
20	Keep at the Specified Humidity Range <i>Belirtilen Nem Aralığında Tutun</i>
21	EU Representative Information <i>AB Temsilcisi Bilgileri</i>
22	Manufacturer Information <i>Üretici Bilgileri</i>